

FØR MÅLING



- 1: Top
- 2: Puls-oxymeter
- 3: Lampe
- 4: Bund
- 5: Dataopsamler



Tjek at dataopsamleren i stikkontakten lyser grøn og gul og dermed er klar til måling



Sid ned og slap af i 5 minutter inden du foretager målingen

FORETAG MÅLING



Åben måleren ved at trykke sammen i bunden

Indsæt fingeren i måleren, som automatisk tænder.

Flyt fingeren rundt til lampen lyser grønt



Måleren viser nu puls og iltmætning

Behold fingeren inde til målingen er sendt og dataopsamleren blinker blå

VEJLEDNING Nonin Onyx II Puls-Oxymeter

Har du problemer med dit udstyr, kan du ringe til
Fælles Servicecenter på
tlf.: 7020 3048